




# DIFF·SAFE®

U.S. PATENT  
5,344,666

## KAN DAMLASI DİSPENSERİ

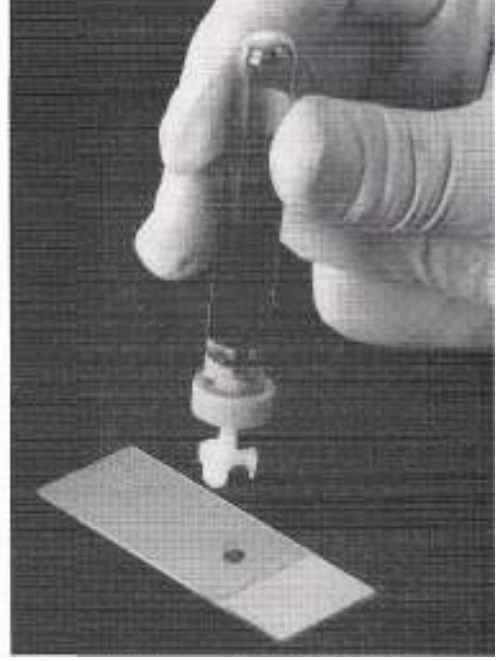

**Bir örnek alma işleminde kan tüpünün stoperinin çıkarılmasına olan gereksinimi ortadan kaldırır.**

VACUTAINER VE HEMOGARD GİBİ KAPAKLI TÜPLERLE UYUMLUDUR.

DIFF SAFE kan dispenseri, hematoloji laboratuvarlarında, kan bankalarında kapağın açılmasıyla havaya salınan patojenlerle ilişkin endişelere karşı çözümdür. Stoperin açılmasına olan gereksinimini ortadan kaldırarak, zararlı patojenlerin havaya salınmasını önler. Ayrıca, pıhtı seçici hücre sayacılarına sahip pek çok laboratuvar da zaten kullanımına gereksinim olmayan, bir çok pipetin kullanılmasını da önlemiş olursunuz.

DIFF SAFE dispenseri kendisine özel bir kullanım kolaylığı sunar.

**1. Adım: Tüpü kapağı yukarıda dik olarak tutunuz ve Diff Safe'in iğnesini lastik stoperin içine sokunuz.**

Bu delme işlemi, karıştırma işlemi öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Laboratuvarların pek çoğunda tüpler halen rafta iken yapılmaktadır. Koruma amaçlı olarak iğne ucu körleştirilmiş ise de, stoperden rahatlıkla geçer; özellikle de eğer stoper daha öncesinde bir otomatik hücre sayacı tarafından delinmiş ise işlem daha da kolaydır.

**UYARI: ELDİVEN TAKINIZ. TÜP BAŞAŞAĞI İKEN DELMEYİNİZ. DAHA ÖNCESİNDE AÇILAN VE KAPATILAN TÜPLER İÇİN, STOPERLERİN TÜPE ÇEPEÇEVRE OTURMUŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ AKSİ HALDE, DIFF SAFE LAMELE BASTIRILDIĞINDA FAZLALIK NUMUNE DIŞARI AKABİLİR.**



# DIFF·SAFE®

## KAN DAMLASI DİSPENSERİ

**2. Adım: Tüpü baş aşağı çeviriniz ve lamelin üstüne bastırınız. KAN LAMELİN ÜZERİNE GELİR GELMEZ, İLK ETAPTA BASKIYI BİR ANLIĞINA AZALTIN, SONRA DA LAMELİN ÜZERİNDEN TAM OLARAK ÇEKİNİZ.**

DIFF-SAFE dispenserı, örnek için ideal ebatlarda olan miktarda bir kan damlasının çıkması için tasarlanmıştır.


EŞDEĞER BİR DAMLA EBADI ÇİN, DIFF SAFE' i YUKARI ÇEKMEDEN ÖNCE, EL BASINCINIZI BİR ANLIĞINA AZALTTIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ.

DIFF-SAFE dispenserı kullanımdan sonra hemen çıkarılabilir ve atılabilir. Ancak, pek çok laboratuarda uygulama, DIFF SAFE' i stoper içinde bırakmak ve sonrasında tüp ile birlikte atmak şeklindedir.

**Örnek alınması için gerekli olan süreyi yarıya indirir ve stresi azaltır.**

Pipetler veya mikropipetler kullanıldığında on beş veya fazlası olan aşamaları içeren klasik prosedürle karşılaştırıldığında, DIFF-SAFE dispenserinin kullanıldığı prosedür gerekli aşamaları üçte iki oranında azaltır. Böylelikle teknisyenin değerli zamanından tasarruf ederken, aynı zamanda da gereksiz atıkları önlemiş olursunuz.

DIFF-SAFE Alpha Scientific Corporation' ın tescilli bir markasıdır. DIFF-SAFE, ABD Patent Numarası 5,344,666 altında korunmaktadır.

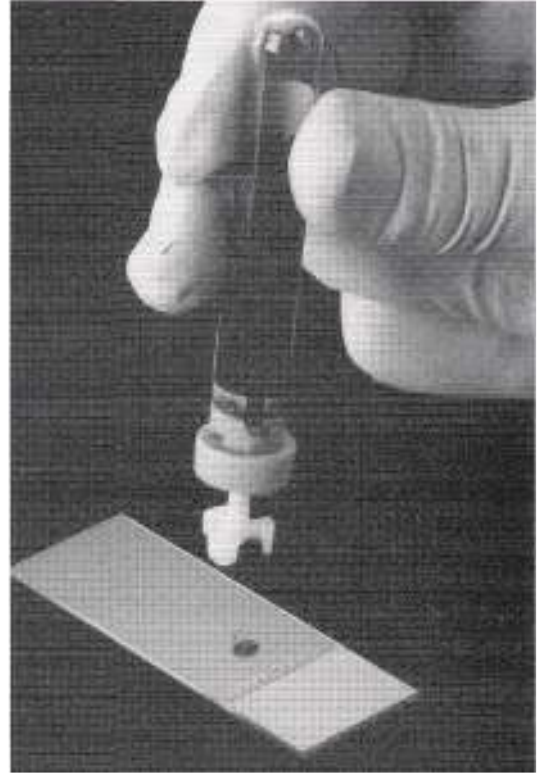

## ALPHA SCIENTIFIC CORPORATION

P.O. Box 725, Southeastern, PA 19399-0725

Tel. 1-610-647-7000 Fax 1-610-647-7496

Toll-Free in the U.S. & Canada

Tel. 1-800-242-5989 Fax 1-800-841-2629

[www.alpha-scientific.com](http://www.alpha-scientific.com)

