

Bebekler İçin Güvenli Lanset SteriHeel®



Onun sağlığı için yapılan
bu ilk ve önemli uygulamada
bebeğinizin canı yanmasın...

Steriheel sağlık görevlilerinin bebek topuğundan kapiller kan örneği alması için özel olarak tasarlanmıştır.



Kontrollü ve hızlı hareketi sayesinde topuktan en ideal miktarda kan alınmasını sağlar, acıyı azaltır, cildin travmatize olmasını önler ve çabuk iyileşme sağlar.

ē KULLANICI GÜVENLİĞİ : Bıçak bölümü kullanım öncesi ve sonrası tamamen kapalıdır.

ē KOLAY KULLANIM: Önceden yüklenmiş ve kolay kullanım için genişletilmiş düğmeye basılarak aktive olan tasarım.




ē HASTA GÜVENLİĞİ: Tek kullanımlıktır, tekrar kullanıma izin vermez, Gama sterilizasyon ile sterilize edilmiştir. Delme derinliği ayarlıdır.

ē YÜKSEK KAN AKIŞI: Bıçağın kontrollü hareketi optimum kan akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

ē UYGULAMA ALANLARI: Öncelikle yeni doğan ve prematüre bebeklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kısa giriş derinliği veya dokunun az miktarda sıkılmasını gerektiren uygulamalarda da kullanılır.

Benzer Lansetlerin Karşılaştırılması:

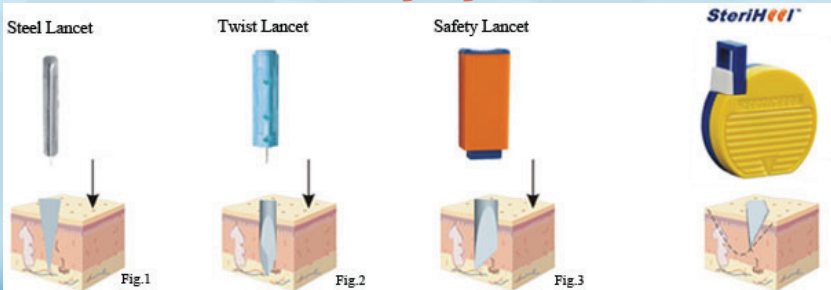

ē SteriHeel'in mikro ve kavisli bıçağı, yüksek hızlı ve süzülerek deliş hareketi sayesinde benzerlerine göre daha fazla kan alınmasını sağlar.

- e Prematüre, yenidoğan olmak üzere farklı bebek topuk ciltlerine uygun farklı modelleri vardır.
- e Sinir uçlarının geçmekte olduğu hassas ve ağrılı bölgenin üzerinde, kapiller yataktan en uygun miktarda kan alınmasını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
- e Sonuç olarak bebeğin hassas topuğundan yüksek kalitede kan örneği, çok daha az acı ve travma oluşturmadan sağlanır.

Uygulama :

1



Uygulama yerini alkol hazırlık ped ile (%70 izopropil) temizleyin ve kurumaya bırakın.

2



Lansetin emniyet tetik kilidini çıkarın.

3



Bebeğin ayağını uygun bir seviyeye kaldırın ve lansetin düz yüzeyi olan bıçak çıkış bölümünü bebeğin topuğuna uygun bir biçimde yerleştirin.

4



Düz yüzeyinin her iki kenarı deri ile hafifçe temas ettikten sonra, tetiğe basın ve lanseti hemen topuktan çekin.

5



İlk çıkan damlanın steril gazlı bez ile silinmesi önerilir.

6



Kapiler tüp veya benzeri bir aparat ile gerekli hacim elde edene kadar kan örneğini toplayarak kan toplama tüpünü doldurun. Kanama durana kadar steril gazlı bez ile uygulama yerine hafifçe bastırın.

Ürün Kodu	Renk Kodu	Derinlik/Kesi Uzunluğu	Kullanım Alanı
05-038575	● Turuncu	0.85mm/1.75mm.	Prematüre
05-031025	● Sarı	1.00mm/2.50mm.	Yenidoğan
05-031428	● Pembe	1.14mm/2.80mm.	Yenidoğan



Türkiye Distribütörü:

**AMPHİ MEDİKAL ÜRÜNLERİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Okul Sk. Doğan Apt. No: 28/9 34662 Altunizade - Üsküdar - İST.
Tel : 0216. 327 12 35 Pbx Tel-Fax : 0216. 327 12 36
www .amphi.com.tr

