


Introducing



**DIFF·SAFE®**

U.S. PATENT  
5,344,666

**KAN DAMLASI DISPENSER**

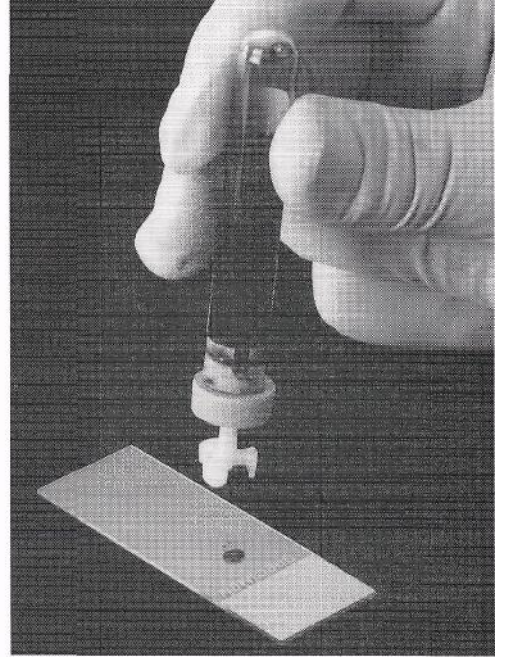

**Bir örnek alma i leminde kan tüpünün stoperinin çıkarılmasına olan gereksinimi ortadan kaldırır.**

VACUTAINER VE HEMOGARD G B KAPAKLI TÜPLERLE UYUMLUDUR.


DIFF SAFE kan dispenseri, hematoloji laboratuvarlarında, kan bankalarında kapa ın açılmasıyla havaya salınan patojenlerle ilgili kin endi elere kar ı çözümdür. Stoperin açılmasına olan gereksinimini ortadan kaldırarak, zararlı patojenlerin havaya salınmasını önler. Ayrıca, pıhtı seçici hücre sayacılarına sahip pek çok laboratuvar da zaten kullanımına gereksinim olmayan, bir çok pipetin kullanılmasını da önlemi olursunuz.

DIFF SAFE dispenseri kendisine özel bir kullanım kolaylığı sunar.

**1. Adım: Tüpü kapa ı yukarıda dik olarak tutunuz ve Diff Safe'in i nesini lastik stoperin içine sokunuz.**

Bu delme i lemi, kar ı tırma i lemi öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Laboratuvarların pek ço unda tüpler halen rafta iken yapılmaktadır. Koruma amaçlı olarak i ne ucu körle tirilmi ise de, stoperden rahatlıkla geçer; özellikle de e er stoper daha öncesinde bir otomatik hücre sayacı tarafından delinmi ise i lem daha da kolaydır.

**UYARI: ELD VEN TAKINIZ. TÜP BA A A I KEN DELMEY N Z. DAHA ÖNCES NDE AÇILAN VE KAPATILAN TÜPLER Ç N, STOPERLER N TÜPE ÇEPEÇEVRE OTURMU OLDU UN DAN EM N OLUNUZ AKS HALDE, DIFF SAFE LAMELE BASTIRILDI İNDA FAZLALIK NUMUNE Dİ ARI AKAB L R.**

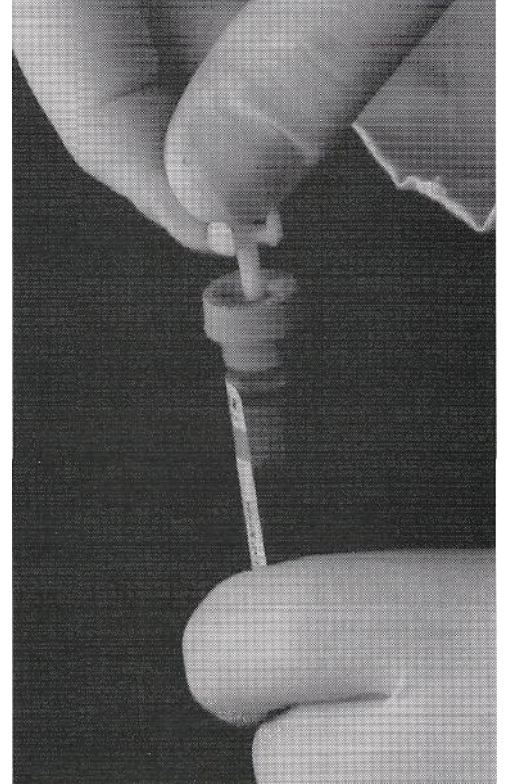

# DIFF-SAFE®

## KAN DAMLASI DISPENSER

**2. Adım: Tüpü başa a ı çeviriniz ve lamelin üstüne bastırınız. KAN LAMELİN ÜZERİNE GELİR GELMEZ, LK ETAPTA BASKIYI BİR ANLIĞINA AZALTIN, SONRA DA LAMELİN ÜZERİNDEN TAM OLARAK ÇEKİNİZ.**

DIFF-SAFE dispenser, örnek için ideal ebatlarda olan miktarda bir kan damlasının çıkması için tasarlanmıştır.



EĞER BİR DAMLA EBADINDAN, DIFF-SAFE'İ YUKARI ÇEKMEYEN ÖNCE, EL BASKINIZI BİR ANLIĞINA AZALTTIĞINDAN EMİN OLUNUZ.

DIFF-SAFE dispenser kullanımdan sonra hemen çıkarılabilir ve atılabilir. Ancak, pek çok laboratuvar uygulamada, DIFF-SAFE'İ stoper içinde bırakmak ve sonrasında tüp ile birlikte atmak eklindedir.

**Örnek alınması için gerekli olan süreyi yarıya indirir ve stresi azaltır.**

Pipetler veya mikropipetler kullanıldığında on beş veya fazlası olan hataları içeren klasik prosedürle karşılaştırıldığında, DIFF-SAFE dispenserinin kullanıldığı prosedür gerekli hataları üçte iki oranında azaltır. Böylelikle teknisyenin de erli zamanından tasarruf ederken, aynı zamanda da gereksiz atıkları önlemi olursunuz.

DIFF-SAFE Alpha Scientific Corporation'ın tescilli bir markasıdır. DIFF-SAFE, ABD Patent Numarası 5,344,666 altında korunmaktadır.

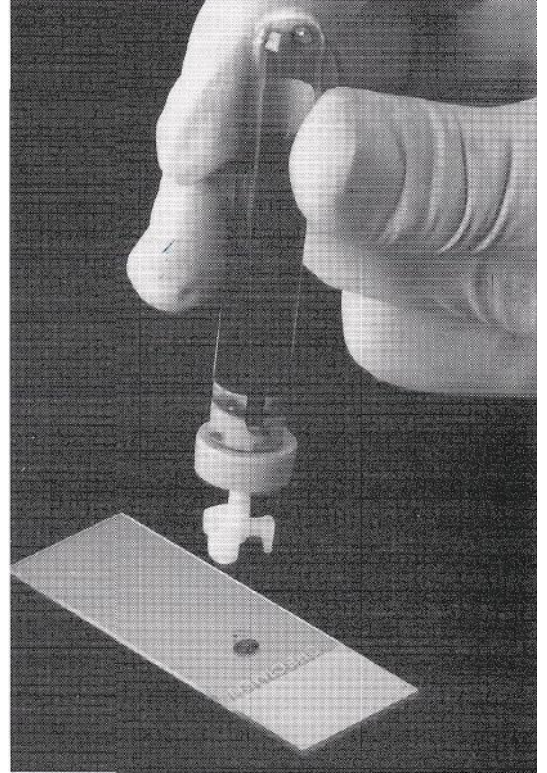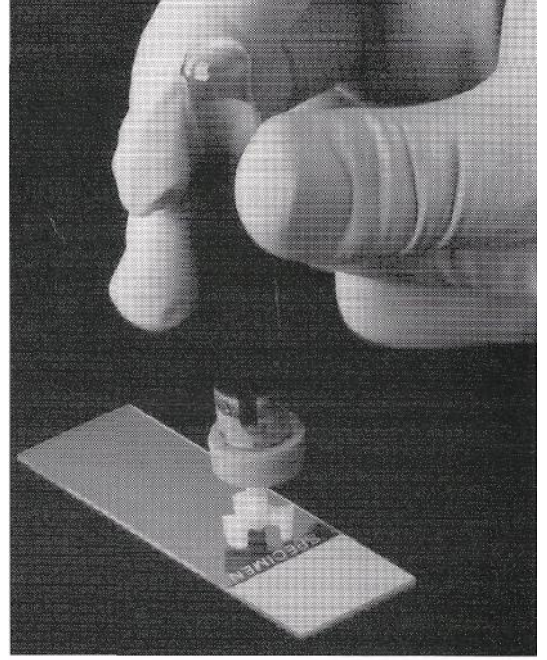

## ALPHA SCIENTIFIC CORPORATION

P.O. Box 725, Southeastern, PA 19399-0725

Tel. 1-610-647-7000 Fax 1-610-647-7496

Toll-Free in the U.S. & Canada

Tel. 1-800-242-5989 Fax 1-800-841-2629